


Consulte nuestros vídeos tutoriales en www.clue-balance.com – los capítulos correspondientes están señalados con este símbolo **VIDEO!**

Retire la tira de protección de las pilas antes de usar el dispositivo.

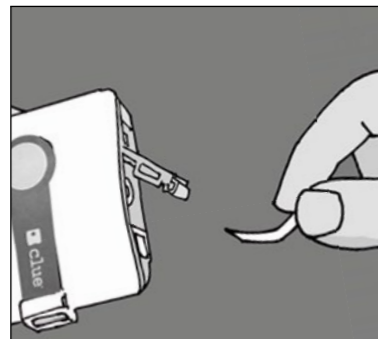

1.

Registro

- Presione **clue balance** firmemente en el centro del esternón y asegúrese de que los cuatro electrodos estén colocados correctamente. Durante el registro permanezca sentado o tumbado en posición relajada.
- El dispositivo se enciende pulsando brevemente una vez la tecla de manejo.
- El registro se inicia en 10 segundos aproximadamente. Después de dos minutos una señal acústica confirma que el registro ha sido realizado. Se pueden guardar hasta 30 registros antes de que sea necesaria la transmisión de datos.



Creación de una cuenta y activación de clue medical


Vaya a www.clue-balance.com

- haga clic en “Iniciar sesión de Centro de Servicios”, “ENTRAR” (LOGIN);
- haga clic en „Crear una nueva cuenta”;
- introduzca el nombre de usuario y la contraseña elegidos en “Datos de acceso”. La contraseña debe tener al menos 8 caracteres entre los cuales debe haber una letra mayúscula, una minúscula y una cifra.
- Active **clue balance** en “Información de dispositivo”. Para ello, introduzca el número de serie (ver S/N en la última página del manual de instrucciones)
- Introduzca el código de activación en “Código de activación” (última página del manual de instrucciones) y cree la cuenta. Haga clic en „Crear cuenta” para concluir la activación del dispositivo.

2.

Transmisión de los datos registrados al Centro de Servicios en línea

- Para la transmisión mediante ordenador personal/portátil debe instalar el programa de ayuda **clueSync**, en su ordenador personal/portátil. Vaya a “Descargar” (Download) en www.clue-balance.com.
- La unidad de infrarrojos USB suministrada sirve de conexión, introducirla en el ordenador personal/portátil, la instalación se inicia automáticamente, de lo contrario es necesaria una instalación manual con el mini CD suministrado.
- Se debe ajustar la posición del conmutador DIP (a la izquierda en el compartimento de las pilas): el conmutador DIP izquierdo debe estar hacia arriba y el conmutador DIP derecho debe estar hacia abajo. **VIDEO!** Colocar **clue balance** a 10 cm aproximadamente de la unidad USB de infrarrojos (la ventana de infrarrojos de **clue balance** debe estar enfrente del USB). Pulsar la tecla de manejo brevemente para encender el dispositivo y una segunda vez para iniciar la transmisión.

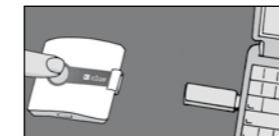

Si la transmisión se realiza correctamente se recibirá una señal acústica.

3.


Vista del dispositivo/ elementos de manejo

- 1 Tecla de manejo
- 2-4 Luces de indicación
- 5 Ventana de infrarrojos
- 6 Toma de conexión para el cable de los electrodos



Vista del dispositivo/ elementos de manejo


- 7 Tapa del compartimento de las pilas con conmutadores DIP para la selección del modo de transmisión
- 8 Electrodo fijos

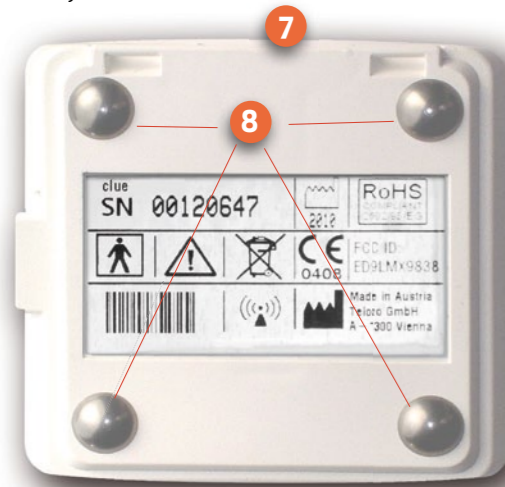

Acceso a las evaluaciones del Centro de Servicios en línea

- Haga clic en "ENTRAR" (LOGIN). **VIDEO!**
- Introduzca el nombre de usuario y la contraseña y seleccione la lengua en caso necesario.
- Aparecen las diferentes evaluaciones asignadas a uno o varios dispositivos **clue balance**.
- En „Detalles ECG“ en „Datos“, haga clic la señal PDF para visualizar una evaluación.

4.

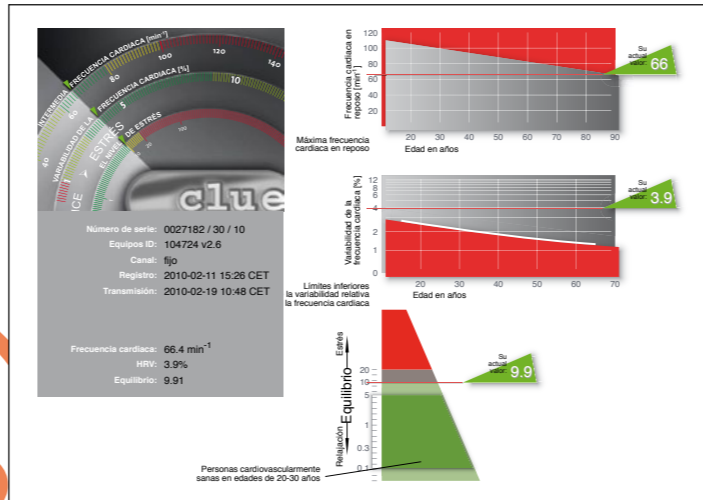

Alternativa: transmisión directa de registro(s) a su ordenador personal/portátil sin integración del Centro de Servicios, sin acceso a Internet

- Los dos conmutadores DIP (a la izquierda del compartimento de las pilas) deben estar hacia abajo. **VIDEO!**
- La unidad de infrarrojos USB debe estar instalada, consultar punto 3.
- Pulse brevemente una vez la tecla de manejo y una segunda vez para iniciar la transmisión. Confirme la pregunta sobre la transmisión con „SI“. Una vez realizada con éxito la transmisión, aparece en el escritorio un icono pdf (el icono pdf consta del número de dispositivo de **clue balance** y el número del registro actual).
- Haga clic en el icono pdf del escritorio para abrirlo.

5.

Manual de instrucciones rápido de
clue balance

clue