
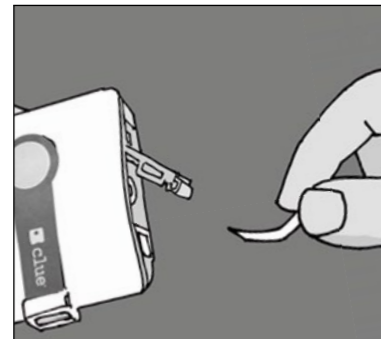


Veillez également consulter nos tutoriels vidéos disponibles à l'adresse www.clue-balance.com – es différents chapitres portent ce symbole: 

Pensez à enlever le film de protection de la batterie avant la mise en marche de l'appareil!



1.

Enregistrer

- Presser le **clue balance** fermement sur la peau au centre de la poitrine et assurez vous que les 4 électrodes soient bien en contact avec la peau. Pendant l'enregistrement, il convient idéalement d'être couché ou assis de manière décontractée.
- En appuyant une fois brièvement sur bouton de commande, l'appareil est mis en marche.
- L'enregistrement démarre après environ 10 secondes. Au bout de deux minutes, un signal acoustique confirme la fin de l'enregistrement. L'appareil est capable de stocker jusqu'à 30 enregistrements avant qu'un transfert de données soit nécessaire.


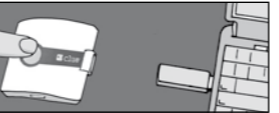


Création et activation d'un compte d'utilisateur clue balance

- Rendez vous sur le site www.clue-balance.com
- Cliquez sur « Service Center Login », puis sur « LOGIN ».
- Cliquez sur « créer un nouveau compte ».
- Dans « Données d'accès », saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre choix. Le mot de passe doit compter d'au moins 8 caractères, dont deux lettres majuscules, deux lettres minuscules et un chiffre.
- Activez **clue balance** à la rubrique « Informations de l'appareil » et saisissez le numéro de série de votre appareil (cf. numéro de série figurant au dos du mode d'emploi).
- Dans la rubrique « Code d'activation », saisissez le code d'activation (figurant également au dos du mode d'emploi) et créez le compte avant d'achever l'activation de votre appareil en cliquant sur « Créer compte ».

2.

Transfert des enregistrements vers le Centre de service en ligne

- Pour le transfert des données au moyen d'un PC ou d'un ordinateur portable, il est nécessaire d'installer l'utilitaire **clueSync** sur votre PC ou votre ordinateur portable ; cf. www.clue-balance.com à la rubrique « Téléchargements ».
 - Branchez la clé USB infrarouge fournie dans l'un des ports USB libres de votre PC ou de votre ordinateur portable pour lancer l'installation automatique. Autrement, une installation manuelle à partir du mini CD fourni est nécessaire.
 - En outre, il convient d'adapter la position des interrupteurs DIP (à gauche du compartiment à piles) : L'interrupteur DIP de gauche doit être réglé pour être en position haute et l'interrupteur DIP de droite doit être en position basse. 
-  Positionnez **clue balance** à une distance d'environ 10 cm de la clé USB infrarouge (la fenêtre IR du **clue balance** doit pointer vers la clé USB), appuyez une fois brièvement sur le bouton de commande pour mettre l'appareil en marche et une seconde fois pour lancer la transmission des données.

Un transfert de données réussi est signalé par un son !

Aperçu de l'appareil / éléments de commande

- 1 Bouton de commande
- 2-4 Voyants
- 5 Fenêtre IR
- 6 Prise de raccordement pour câble électrique

