


Si prega di visionare anche i nostri tutorial video sul sito www.clue-balance.com – i rispettivi capitoli sono contrassegnati con questo simbolo: **VIDEO!**

1.

Registrazione

- Premere energicamente **clue balance** sulla cute al centro del petto ed assicurarsi che i 4 elettrodi siano applicati correttamente. Durante la fase di registrazione si consiglia di sedere o giacere in posizione rilassata e distesa.
- Premendo una volta brevemente il tasto di comando, l'apparecchio si accende.
- La registrazione si avvia dopo circa 10 secondi. Dopo due minuti un segnale acustico conferma la fine della registrazione. E' possibile salvare fino a 30 registrazioni prima che sia necessario un trasferimento dei dati.

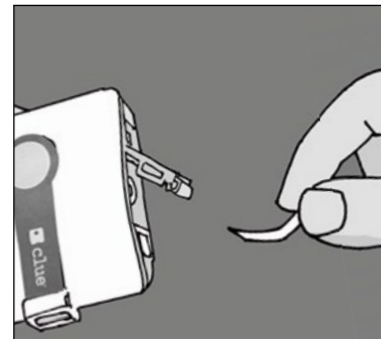

Prima della messa in funzione togliere la pellicola protettiva della batteria!




Apertura di un conto utente e attivazione di clue balance

- Andate su www.clue-balance.com
- Cliccate su "Service Center Login" "LOGIN".
- Cliccate su "Crea un nuovo conto".
- Andate alla voce "Dati d'accesso" ed immettete un nome utente ed anche una password a vostra scelta. La password deve essere composta da almeno 8 caratteri, di cui una maiuscola, una minuscola ed una cifra.
- Attivare **clue balance** alla voce "Informazioni sull'apparecchio", immettendo il numero di serie (vedi S/N sul retro dell'istruzione d'uso).
- Alla voce "Codice d'attivazione" immettere il relativo codice d'attivazione (vedi retro dell'istruzione d'uso) ed aprire il conto terminando l'attivazione dell'apparecchio cliccando su "Apri conto".

2.

Trasmissione delle registrazioni all'Online Service Center

- Per la trasmissione mediante PC/notebook occorre installare l'utility **clueSync** sul proprio PC/notebook, vedi www.clue-balance.com alla voce "Download".
- Inserendo lo stick USB ad infrarossi in dotazione in una porta USB libera del PC/notebook, si avvia l'autoinstallazione, altrimenti è necessaria l'installazione manuale del mini-CD in dotazione.
- Parimenti, occorre adattare la posizione degli interruttori DIP (a sinistra del vano batteria): l'interruttore DIP sinistro deve essere posizionato verso l'alto e quello destro verso il basso. **VIDEO!** Posizionare **clue balance** a ca. 10 cm dallo stick USB ad infrarossi (la finestra ad infrarossi dell'apparecchio **clue balance** deve essere rivolta verso lo stick USB), premere brevemente il tasto di comando per inserire l'apparecchio e poi una seconda volta per avviare la trasmissione.

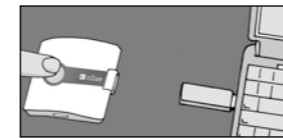

L'avvenuta trasmissione viene segnalata con una spia acustica!

3.


Panoramica dell'apparecchio / Elementi di comando

- 1 tasto di comando
- 2-4 spie luminose
- 5 finestra a infrarossi
- 6 connettore per cavo degli elettrodi



Panoramica dell'apparecchio / Elementi di comando


- 7 coperchio vano batteria con interruttori DIP per selezione modalità di trasmissione
- 8 elettrodi fissi

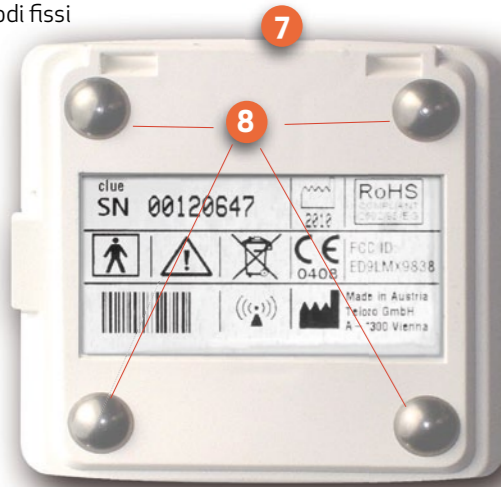

Accesso ai risultati nell'Online Service Center

- Cliccare su "LOGIN" nella homepage. **VIDEO!**
- Immettere nome utente e password ed eventualmente selezionare la lingua.
- Vengono visualizzati i vari risultati attinenti ad uno o più apparecchi **clue balance**.
- Cliccare sul risultato desiderato (prima rubrica, su #).
Alla voce "Dati" in "Dettagli ECG" cliccare sul segno PDF per ottenere il risultato in versione di grafico.

4.

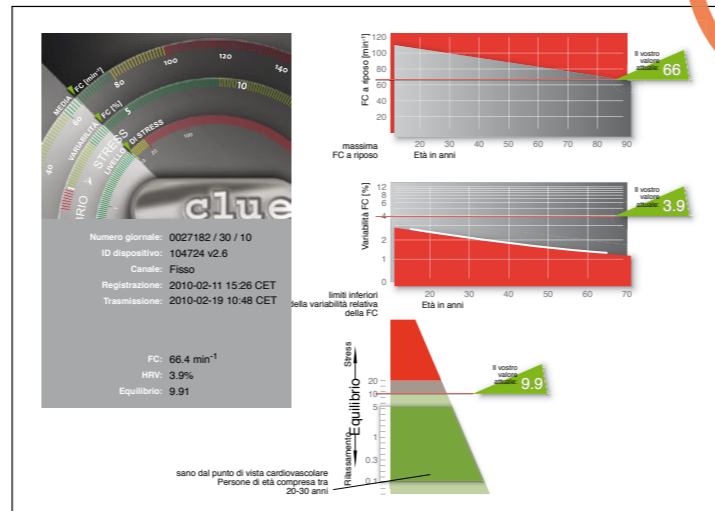

Alternativa: La trasmissione diretta della(e) registrazione(i) sul vostro PC/Laptop senza coinvolgimento del Service Center, senza accesso tramite Internet

- Entrambi gli interruttori DIP (a sinistra del vano batteria) devono essere posizionati verso il basso.
- Lo stick USB ad infrarossi deve essere installato, vedi punto 3.
- Premere una volta brevemente il tasto di comando e poi una seconda volta per avviare la trasmissione. Dopo la trasmissione, confermare la domanda con "SI". A trasmissione avvenuta, apparirà sul desktop un segno PDF (il simbolo PDF contiene il numero del modello **clue balance** come pure l'attuale numero di registrazione).
- Per visionare, cliccare sul simbolo PDF sul desktop.

Breve istruzione d'uso clue balance

clue