


Si prega di guardare attentamente anche i nostri video tutorial sul sito www.clue-medical.com, I relativi capitoli sono contrassegnati da questo simbolo **VIDEO!**

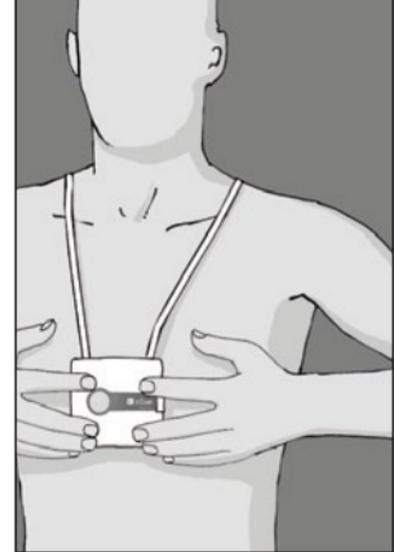

Registrazione


- Premere con decisione **clue medical** sullo sterno e assicurarsi che i quattro elettrodi si trovino correttamente a contatto con la pelle. Durante la registrazione si raccomanda di sedersi o di sdraiarsi in maniera rilassata.
- Premendo brevemente una volta il tasto di accensione, il dispositivo si attiva.
- La registrazione ha inizio dopo circa 10 secondi. Dopo 2 minuti un segnale acustico conferma la fine della registrazione. È possibile salvare fino a 30 registrazioni prima che si renda necessaria la trasmissione dei dati.



Apertura di un account utente e attivazione di clue medical


Andare sul sito www.clue-medical.com

- Alla voce "Login Centro servizi" cliccare su "LOGIN".
- Cliccare su "Crea nuovo account".
- Nelle "Informazioni account" inserire il nome utente e la password scelti liberamente. La password deve essere composta da almeno 8 caratteri, di cui almeno uno maiuscolo, uno minuscolo e un numero.
- Per registrare **clue medical** alla voce "Informazioni dispositivo", inserire il relativo numero di serie (vedi copertina posteriore del Manuale di istruzioni).
- Inserire alla voce "Codice attivazione" il relativo codice di attivazione, (vedi copertina posteriore del Manuale di istruzioni), aprire l'account, e cliccando su "Crea account" si conclude la procedura di attivazione del dispositivo.

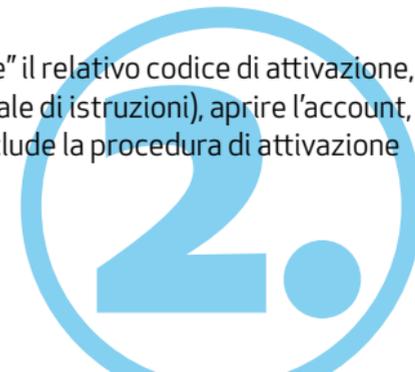


Trasmissione delle registrazioni al Centro servizi online

- Per trasmettere i dati tramite PC/Laptop è necessario installare il programma di utility **clueSync** sul proprio PC/Laptop, vedi www.clue-medical.com alla voce "Download".
- Inserire la chiave USB a infrarossi acclusa e inserirla in una porta USB libera del PC/Laptop, il driver del dispositivo si avvierà da solo, in caso contrario sarà necessario installarlo manualmente dal mini-CD accluso.
- È inoltre necessario osservare la posizione dei DIP switch (a sinistra del vano batteria): il dip switch sinistro deve trovarsi in alto, ed il dip switch destro deve trovarsi in basso. Posizionare clue medical a ca. 10 cm dalla chiave USB a infrarossi (la finestrella a infrarossi del dispositivo clue medical deve essere

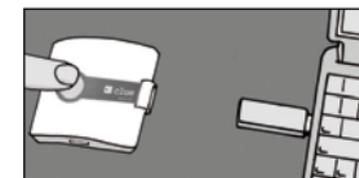

Un segnale acustico confermerà l'avvenuta trasmissione.

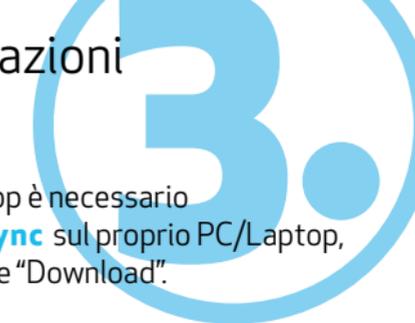


Panoramica del dispositivo / elementi di comando

- 1 Tasto di accensione
- 2-4 Spie di segnalazione
- 5 Finestrella a infrarossi
- 6 Porta di collegamento per il cavo degli elettrodi




Prima di mettere in funzione l'apparecchio, rimuovere la striscia di protezione della batteria

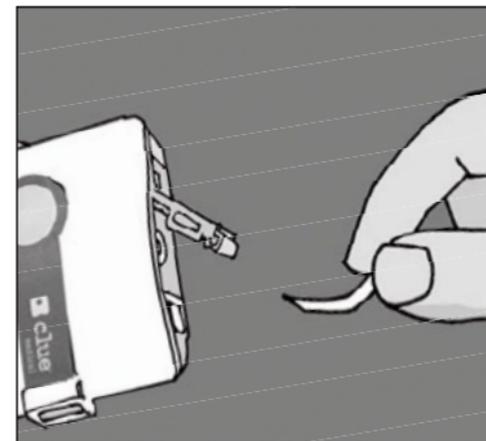


Panoramica del dispositivo / elementi di comando

- 7 Coperchio vano batteria con DIP switch per la selezione della modalità di trasmissione
- 8 Elettrodi fissi


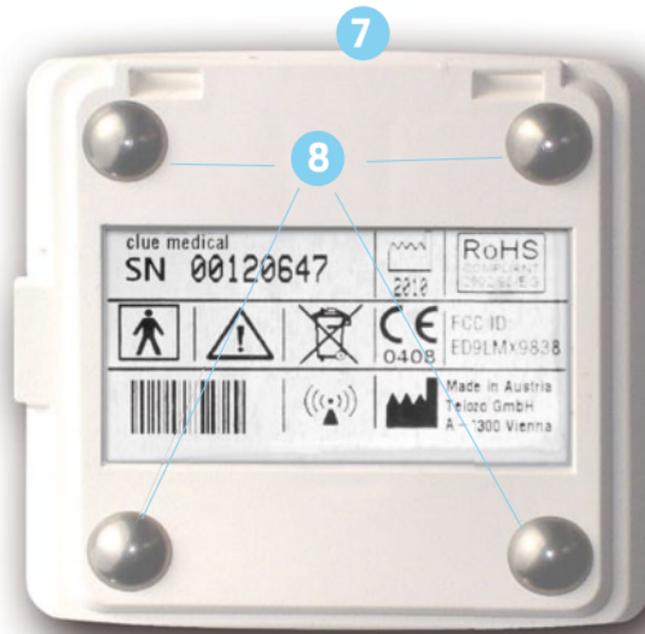


Accesso alle registrazioni sul Centro servizi online

- Sulla home page cliccare su "LOGIN". VIDEO!
- Inserire nome utente e password e selezionare eventualmente la lingua.
- Compariranno le diverse registrazioni, assegnate a uno o a più dispositivi **clue medical**.
- Cliccare sulla registrazione desiderata (prima colonna, alla voce #). Alla voce "Dettagli ECG", cliccando su "clue" alla voce "Dati", apparirà una presentazione grafica semplificata per pazienti.

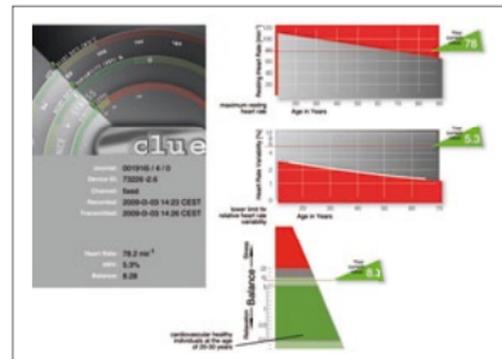

- Cliccando invece su "medico" apparirà la relativa presentazione per i medici, incluso un ECG di 2 minuti.

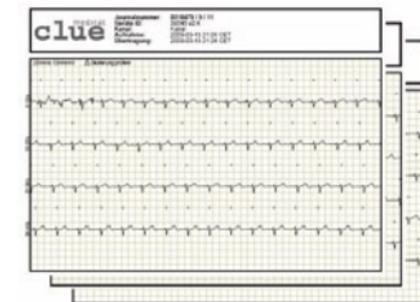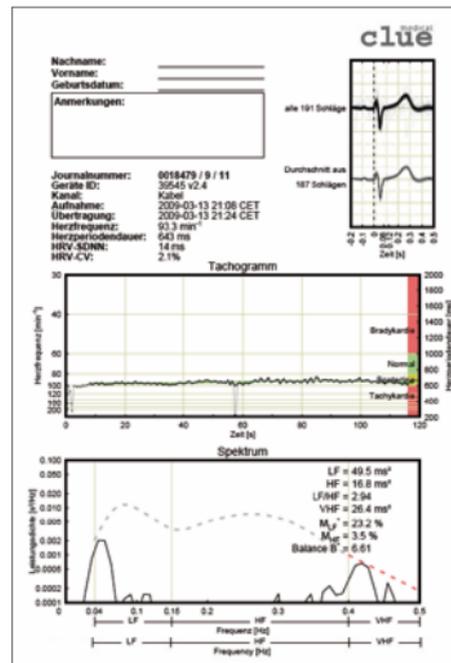

In alternativa, è possibile trasmettere direttamente la/e registrazione/i sul proprio PC/Laptop, senza collegarsi al Centro servizi, e senza accedere ad Internet

- I due dip switch (a sinistra del vano batteria) devono essere posti in basso. VIDEO!
- Installare la chiavetta USB a infrarossi, vedi punto 3.
- Premere una volta brevemente il tasto di accensione, e una seconda volta, per iniziare la trasmissione. Rispondere "si" sulla finestra dove si chiede se si vogliono trasmettere i dati. Al termine della trasmissione comparirà sul desktop un'icona PDF che contiene il numero del dispositivo clue medical ed il numero di registrazione.
- Per visualizzare il file, cliccare sull'icona PDF.



Breve manuale di istruzioni
clue medical

